

Tymczasowe wypełnienie **Plomb-R**[®] to idealne rozwiązanie jeśli wypadła Ci plomba, ukruszył lub złamał się ząb.

Wskazania: ubytki w zębach

Do stosowania zarówno w zębach
stałych jak i mlecznych

NOWOŚĆ!
Jedyny na rynku

Natychmiastowa pomoc

Plomb-R[®]
Tymczasowe wypełnienie

3g

Plomb-R[®]
Tymczasowe wypełnienie zęba

Made in U.K.



- ▶ Do samodzielnej aplikacji
- ▶ Wystarcza przeciętnie na 10 wypełnień
- ▶ Gotowy do użycia



▶ 200mg do przelicia

- ▶ zabezpiecza ząb przed nadwrażliwością związaną z bolesną reakcją na ciepło i zimno
- ▶ zabezpiecza ząb przed nadwrażliwością związaną z dostawaniem się pokarmu, bolesna reakcja na słodkie i kwaśne
- ▶ zabezpiecza ząb przed czynnikami zewnętrznymi, jak bakterie i resztki jedzenia
- ▶ zabezpiecza język i policzki przed ostrymi krawędziami szkliwa
- ▶ chroni przed bolesnym uciskiem na dziąsło w miejscu gdzie brakuje zęba

Dystrybutor:

 **TRIDENT**

Trident S.A.

ul. Średnia 15/4
41-200 Sosnowiec

tel.: +48 32 411 90 16
tridentsa@tridentsa.pl

więcej na:

www.plomb-r.pl

1



Wyciśnij niewielką ilość preparatu Plomb-R. Włóż do zęba który wymaga wypełnienia.

2



W przypadku zębów do których dostęp jest utrudniony, użyj szpatułki znajdującej się w opakowaniu.

3



Delikatnie zagryź. Pasta stwardnieje w kontakcie ze śliną. Sprawdź czy ząb nie jest nadmiernie wypełniony preparatem. Oczekaj minutę, a następnie przepłucz usta ciepłą wodą i wypłuj. Przez co najmniej 15 minut nie zagryzaj i nie dociskaj wypełnienia w zębie. Jak najszybciej udaj się do stomatologa.